

体組成計B100を使用する方のための 利用者と測定機器の登録方法

※スマイルデータビジョンパーソナル2を御利用される場合の手順です。

他のソフトウェアを御利用する場合は、そのソフトウェアの使い方をご参照下さい

※製品の取扱説明書も必ずご確認ください。

体組成計B100には、「①お一人で使用する」、「②ご家族など複数人で使用する」、「③ゲストが使用する」場合の、3つのモードがあります。

スマイルデータビジョンパーソナル2に通信して使用方法は、「①お一人で使用する」、「②ご家族など複数人で使用する」いずれかひとつの使用方法を最初に選択します。

①お一人で使用するP2

※データカードは必須ではありません。

データカードを使用しない場合は、パソコンと体組成計を直接通信します。

②ご家族など複数人で使用する.....P7

※データカードが人数分必須です。

パソコンと体組成計を直接通信はできません。

①お一人で使用する

■体組成計に日時などを設定します(取扱説明書もご参照ください)

★設定を行う時は、必ず体組成計を水平に置いて設定してください。
体組成計を斜めにしたり、立てて行くと正しく設定できません。

1 電池を入れる

単3形乾電池4本を、⊕と⊖を間違わないように入れてください。
「♪ピッ」と鳴り、現在設定されている地域番号が表示されます。



2 右の表に記載された地域番号を表示させる

(例)「-1-」で登録を行う場合

- ① ▲ で「-1-」を表示させる
- ② ■ を押して決定する



「♪ピッ」と鳴り、次の設定項目「年」が点滅表示します。

使用する地域により重力の大きさは異なります。高精度のはかりは、その影響を受けて誤差を生じることがあります。本品は地域番号を登録することで、その誤差を小さくすることができます。

出荷時の地域番号は「-3-」です。その地域で使用する場合は、変更する必要はありません。

地域番号	使用地域
-1-	北海道
-2-	青森、岩手、宮城、秋田、山形
-3-	福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、新潟、富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口
-4-	徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
-5-	沖縄

①お一人で使用する

1 「西暦」を設定する

(例)「2016年」を設定する場合

- ① 又は を押して、「西暦(2016年)」を表示させる
- ② を押して決定する

「♪ピッ」と鳴り、次の設定項目「月」が点滅表示します。




2 「月」を設定する

(例)「7月」を設定する場合

- ① 又は を押して、「月(7月)」を表示させる
- ② を押して決定する

「♪ピッ」と鳴り、次の設定項目「日」が点滅表示します。

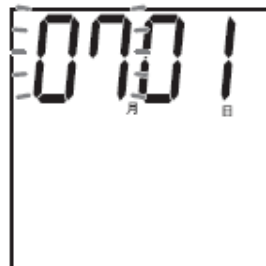

3 「日」を設定する

(例)「27日」を設定する場合

- ① 又は を押して、「日(27日)」を表示させる
- ② を押して決定する

「♪ピッ」と鳴り、次の設定項目「時」が点滅表示します。




4 「時」を設定する

(例)「23時」を設定する場合

- ① 又は を押して、「時(23時)」を表示させる
- ② を押して決定する

「♪ピッ」と鳴り、次の設定項目「分」が点滅表示します。

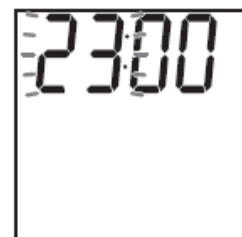


5 「分」を設定する

(例)「48分」を設定する場合

- ① 又は を押して、「分(48分)」を表示させる
- ② を押して決定する

「♪ピッ」と鳴り、設定内容が表示され、その後、自動的に電源が切れます。

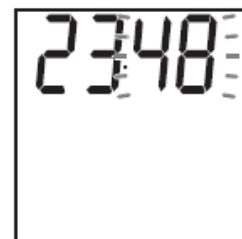


①お一人で使用する

■個人情報を設定します(取扱説明書もご参照下さい)

★設定を行う時は、必ず体組成計を水平に置いて設定して下さい。
体組成計を斜めにしたり、立てて行くと正しく設定が出来ません

1 を押す

「♪ピッ」と鳴り、「年齢」が点滅表示します。
工場出荷時には「40才」に設定されています。




2 「年齢」を登録する


(例)「34才」に変更する場合

① 又はを押して、「年齢(34才)」を表示させる


② を押して決定する



「♪ピッ」と鳴り、次の設定項目「性別」が点滅表示します。



→



※工場出荷時「40才」


3 「性別」を登録する

(例)「男性」を登録する場合


① 又はを押して、「男性」を表示させる

② を押して決定する

「♪ピッ」と鳴り、次の設定項目「身長」が点滅表示します。

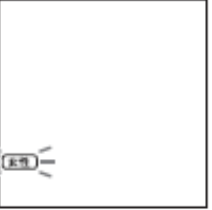

→




※工場出荷時「女性」

4 「身長」を登録する


(例)「162cm」を登録する場合

① 又はを押して、「身長(162cm)」を表示させる

② を押して決定する

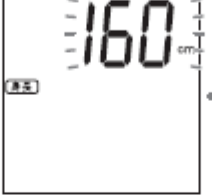

→




※工場出荷時「160cm」

↓



「♪ピッ」と鳴り、設定内容が表示された後に「End」が表示され、自動的に電源が切れます。



•設定内容が間違えた場合には、P.14の手順1に戻って登録し直してください。

①お一人で使用する

■利用者と体組成計をスマイルデータビジョンパーソナル2に登録する

1. スマイルデータビジョンパーソナル2を起動し、「新規登録」をクリック。
利用者の情報を入力します。

新規登録

キャンセル

基本情報 目標値設定 時間帯設定 機器登録 登録完了

次へ

利用者基本情報

利用者の基本情報を入力してください。 ※は入力必須項目

※ 漢字 姓 名 備考

若葉 輝夫

※ カナ ワカバ テルオ

※ ID 19710902

性別 男

生年月日 1971年 9月 2日

身長 165 cm

体重 77 kg

※既に利用者を登録している場合は、「登録情報表示」をクリックして下さい

※入力方法の詳細は、マニュアルをご覧ください
マニュアルは、ソフトウェア右上の



をクリックしてください

①お一人で使用する

2. 新規登録を進めていくと、通信する機器を登録する「機器登録」の画面が表示されます

※「登録情報表示」をクリックした方は「バイタル機器」タブをクリックし、表示して下さい

新規登録 キャンセル

基本情報 目標値設定 時間帯設定 機器登録 登録完了

この利用者へ登録したい機器がある場合、NFCリーダー/ライターへバイタル機器を置いてください。

登録されているバイタル機器一覧 削除

バイタル機器名	シリアルナンバー		
	No.1	No.2	No.3
血糖計			
血圧計			
歩行強度計			
体組成計			
パルスオキシメータ			
体温計			
女性体温計			
データカード			

体組成計の  部にNFCリーダー／ライターを乗せて通信し、機器登録します



登録出来ると、体組成計のシリアルナンバーが画面表示されます

右上の「完了」をクリックし、登録を完了します

バイタル機器名	シリアルナンバー	
	No.1	No.2
血糖計		
血圧計		
歩行強度計		
体組成計	5131000586	
パルスオキシメータ		
体温計		
女性体温計		
データカード		


②ご家族など複数人で使用する

■体組成計に日時などを設定します(取扱説明書もご参照ください)

★設定を行う時は、必ず体組成計を水平に置いて設定してください。
体組成計を斜めにしたり、立てて行くと正しく設定できません。

1 電池を入れる

単3形乾電池4本を、⊕と⊖を間違わないように入れてください。
「♪ピッ」と鳴り、現在設定されている地域番号が表示されます。

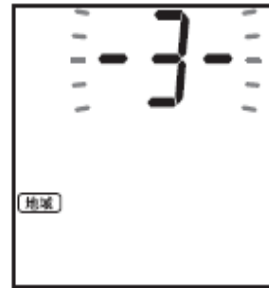

2 右の表に記載された地域番号を表示させる

(例)「-1-」で登録を行う場合

- ① で「-1-」を表示させる
- ② を押して決定する



「♪ピッ」と鳴り、次の設定項目「年」が点滅表示します。

使用する地域により重力の大きさは異なります。高精度のはかりは、その影響を受けて誤差を生じることがあります。本品は地域番号を登録することで、その誤差を小さくすることができます。
出荷時の地域番号は「-3-」です。その地域で使用する場合は、変更する必要はありません。

地域番号	使用地域
-1-	北海道
-2-	青森、岩手、宮城、秋田、山形
-3-	福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、新潟、富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口
-4-	徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
-5-	沖縄

②ご家族など複数人で使用する

1 「西暦」を設定する

(例)「2016年」を設定する場合

- ① 又は を押して、「西暦(2016年)」を表示させる
- ② を押して決定する

「♪ピッ」と鳴り、次の設定項目「月」が点滅表示します。




2 「月」を設定する

(例)「7月」を設定する場合

- ① 又は を押して、「月(7月)」を表示させる
- ② を押して決定する

「♪ピッ」と鳴り、次の設定項目「日」が点滅表示します。

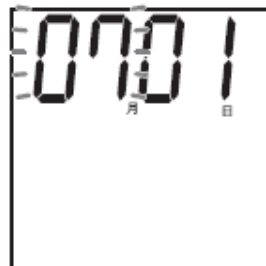

3 「日」を設定する

(例)「27日」を設定する場合

- ① 又は を押して、「日(27日)」を表示させる
- ② を押して決定する

「♪ピッ」と鳴り、次の設定項目「時」が点滅表示します。




4 「時」を設定する

(例)「23時」を設定する場合

- ① 又は を押して、「時(23時)」を表示させる
- ② を押して決定する

「♪ピッ」と鳴り、次の設定項目「分」が点滅表示します。

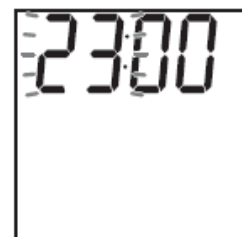


5 「分」を設定する

(例)「48分」を設定する場合

- ① 又は を押して、「分(48分)」を表示させる
- ② を押して決定する

「♪ピッ」と鳴り、設定内容が表示され、その後、自動的に電源が切れます。

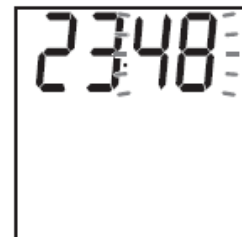



②ご家族など複数人で使用する


■複数人モードに設定します


★設定を行う時は、必ず体組成計を水平に置いて設定して下さい。
体組成計を斜めにしたり、立てて行くと正しく設定が出来ません


①  と  を同時に押す

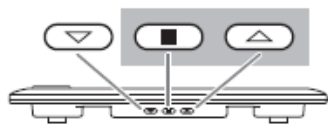


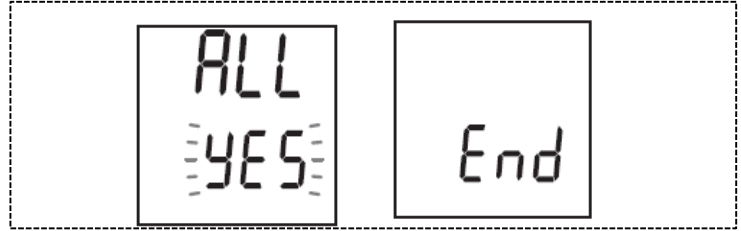
②  を何回か押して、複数人モードを選択する

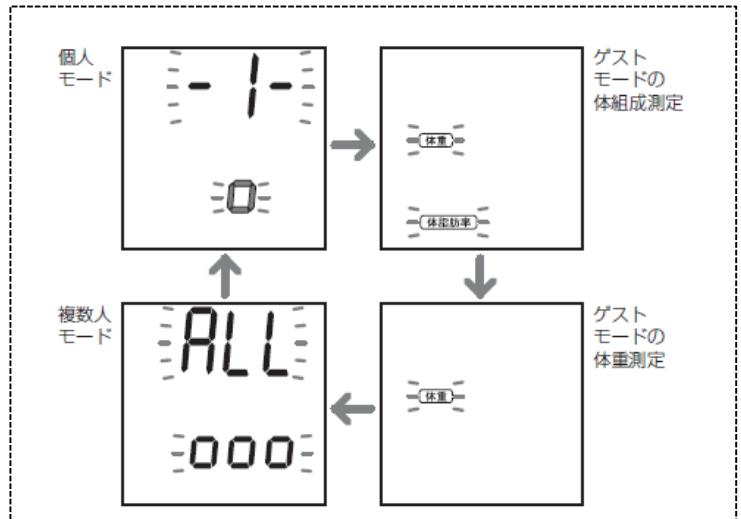


③ 複数人モード(「ALL」表示点滅)で、 を押す

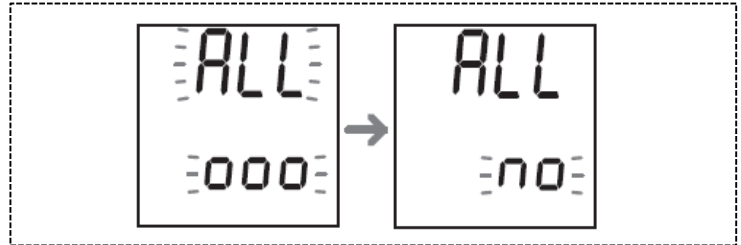

④  を押して、「YES」を点滅表示させる



⑤  を3秒間長押しする

②ご家族など複数人で使用する

■ご利用者とデータカードを登録します

1. スマイルデータビジョンパーソナル2を起動し、「新規登録」をクリック。
利用者の情報を入力します。

新規登録

キャンセル

基本情報 目標値設定 時間帯設定 機器登録 登録完了

次へ

利用者基本情報

利用者の基本情報を入力してください。 ※は入力必須項目

※ 漢字	姓	名	備考
	若葉	輝夫	
※ カナ	ワカバ	テルオ	
※ ID	19710902		
性別	男		
生年月日	1971年 9月 2日		
身長	165 cm		
体重	77 kg		

※既に利用者を登録している場合は、「登録情報表示」をクリックして下さい

※入力方法の詳細は、マニュアルをご覧ください
マニュアルは、ソフトウェア右上の



をクリックしてください。

※必ず、＜性別＞＜生年月日＞
＜身長＞を入力して下さい
この情報がないと、体組成測定が
できず、体重だけの測定になります

②ご家族など複数人で使用する

2. 新規登録を進めていくと、通信する機器を登録する「機器登録」の画面が表示されます

※「登録情報表示」をクリックした方は「バイタル機器」タブをクリックし、表示して下さい



データカードの  部をNFCリーダー／ライターに乗せて通信し、機器登録します




登録出来ると、データカードのシリアルナンバーが画面表示されます

右上の「完了」をクリックし、登録を完了します


バイタル機器名	シリアルナンバー	
	No.1	No.2
血糖計		
血圧計		
歩行強度計		
体組成計		
パルスオキシメータ		
体温計		
女性体温計		
データカード	0000000111	

②ご家族など複数人で使用する

3. 登録が完了したら、再び データカードの  部を NFCリーダー／ライターに乗せて通信します



4. 下記の順番でポップアップが表示され、最後に「閉じる」をクリックすると画面にグラフが表示されます。

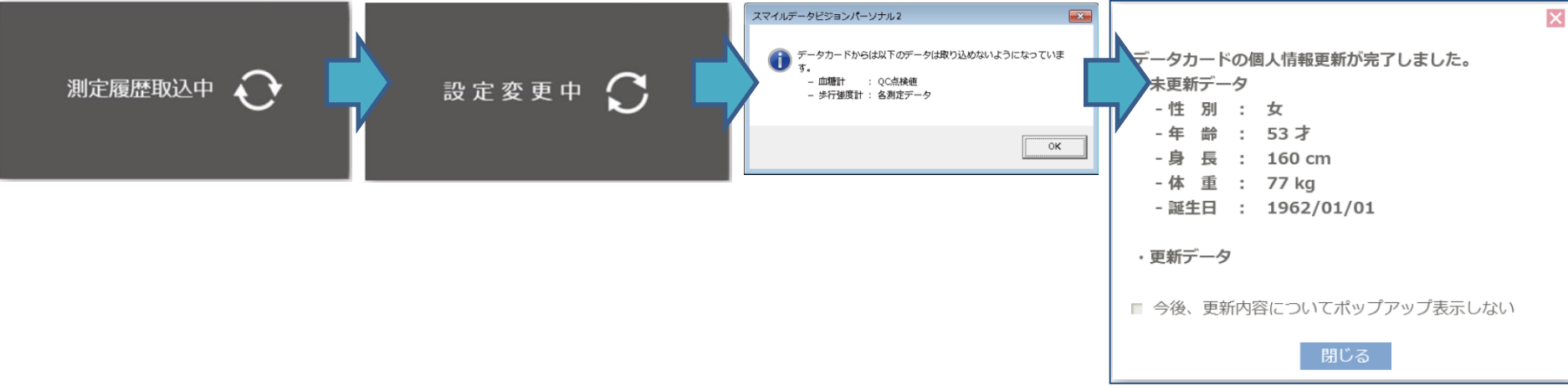

以上で、複数人で測定出来る準備が完了です。測定方法は、体組成計のマニュアルをご参照下さい