

# 血圧計W700、体温計C215、パルスオキシメータ ファインパルスSP を使用する方のための、利用者と測定機器の登録方法

※スマイルデータビジョンパーソナル2を御利用される場合の手順です。

他のソフトウェアを御利用する場合は、そのソフトウェアの使い方をご参照下さい。

※血圧計W700を例に説明しておりますが、体温計、パルスオキシメータも手順は同じです。

※各製品の取扱説明書も必ずご確認ください。


1. 登録の前に、血圧計の電池を入れ、  
血圧を一度測定します。  
(日時設定を行うための測定)

※この値は、スマイルデータビジョンパーソナル2  
で通信してもデータはパソコンに取り込みません



2. スマイルデータビジョンパーソナル2  
を起動し、「新規登録」をクリック  
利用者の情報を入力します。

※既に利用者を登録している場合は、  
「登録情報表示」をクリックして下さい

※入力方法の詳細は、マニュアルをご覧ください  
マニュアルは、ソフトウェア右上の  ヘルプ  
をクリックしてください。

新規登録 ✕ キャンセル

基本情報   目標値設定   時間帯設定   機器登録   登録完了

次へ ▶

---


利用者基本情報


利用者の基本情報を入力してください。 ※は入力必須項目

※ 漢字	姓	名	備考
	若葉	輝夫	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>
※ カナ	ワカバ	テルオ	
※ ID	19710902		
性別	男		
生年月日	1971年 9月 2日 		
身長	165 cm		
体重	77 kg		

### 3. 新規登録を進めていくと、通信する機器を登録する「機器登録」の画面が表示されます

※「登録情報表示」をクリックした方は「バイタル機器」タブをクリックし、表示して下さい

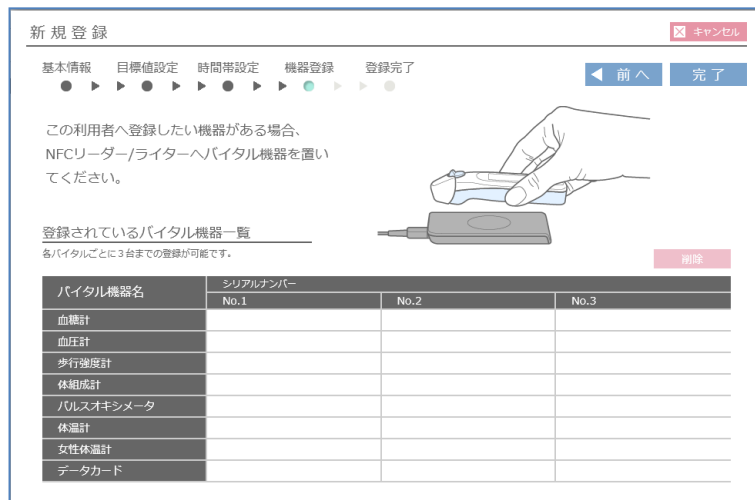

NFCリーダー／ライターを血圧計の  部に  
乗せて通信し、機器登録します




登録出来ると、血圧計のシリアルナンバーが  
画面表示されます


右上の「完了」をクリックし、登録を完了します

バイタル機器名	シリアルナンバー	
	No.1	No.2
血糖計		
血圧計	5131000647	
歩行強度計		
体組成計		
パルスオキシメータ		
体温計		
女性体温計		
データカード		

4. 登録を完了すると、右の表示が出ます。  
「OK」をクリックして、登録した血圧計に  
NFCリーダー／ライターを置いて下さい

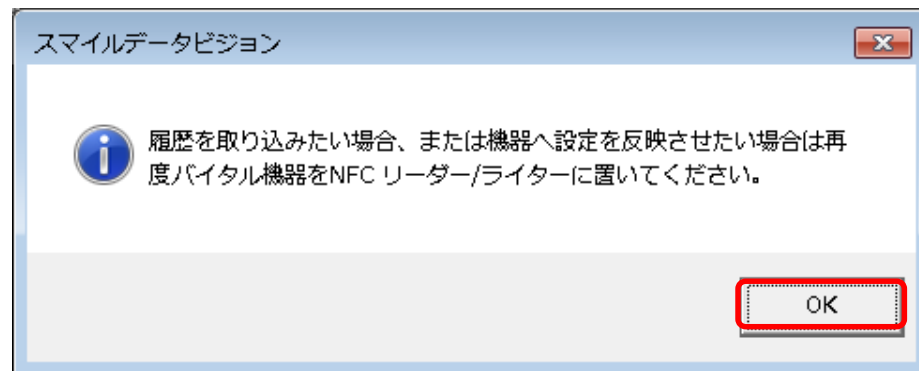

右の表示が出たら「OK」をクリックして下さい

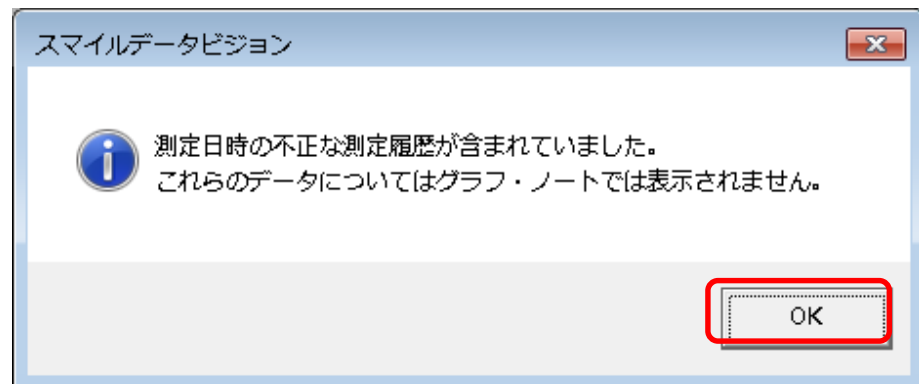

右の表示が出たら「OK」をクリックして下さい

